



www.physiodose.si

Physiodose

sterilna fiziološka raztopina
za nos in oči



Varna in enostavna uporaba

Medicinski pripomoček

Brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah

Dr. Gorkič

Gilbert
LABORATOIRES

Physiodose


12 plasten po 5 ml

UPORABA

OČI

Za čiščenje, izpiranje in vlaženje oči.

Kapalna plastenka oblikuje pravilno obliko kapljice.

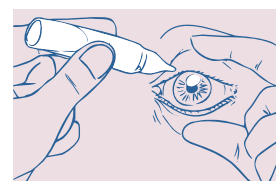

NOSNA SLUZNICA

Za izpiranje in vlaženje nosne sluznice ter za lajšanje težav pri zamašenem nosu ob prehladu ali nahodu.



UŠESA

Za čiščenje ušes po uporabi raztopine A-cerumen, ki raztaplja zamaške iz ušesnega masla (naprodaj v lekarnah brez recepta). Upoštevajte navodilo za uporabo raztopine A-cerumen.

RANE

Za izpiranje ran.

Rano sperite s celotno vsebino plastenke. Ob tem pazite, da plastenka ne pride v stik z rano. Odvečno tekočino obrišite samo z zdravega dela kože v okolici rane.

INHALACIJE

Kot topilo za inhalacije.

Upoštevajte navodilo za uporabo inhalatorja.

SESTAVA

Natrijev klorid, 0,9 g; prečiščena voda, do 100 ml.

Brez konzervansov.

UPORABA

Raztopina je namenjena dojenčkom, otrokom in odraslim.

Uporabite po potrebi, 1- do 6-krat na dan.

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

Zaradi možnosti okužbe raztopine v plastenki je raztopina uporabna največ 24 ur po odprtju.



PROIZVAJALEC: Lab. GILBERT, Herouville Saint Claire, Francija
UVOZNIK: DR. GORKIČ d.o.o., Obrtniška 11, Logatec