

## Physiodose nosni aspirator na vdih



Varen  
Enostaven  
Učinkovit




**Dr. Gorkič**

**Gilbert**  
LABORATOIRES

## Physiodose nosni aspirator na vdih

**Zakaj je priporočljivo uporabljati  
nosni aspirator za dojenčke?**

Dojenčki do prvega leta starosti dihalo samo skozi nos in niso sposobni sami izpihati sluzi. Izločena sluz v nosku dojenčku otežuje dihanje. Z nosnim aspiratorjem na vdih boste lahko otroku odstranili sluz iz noska. Očiščene in prehodne nosnice omogočajo dojenčku miren spanec in lažje dojenje.

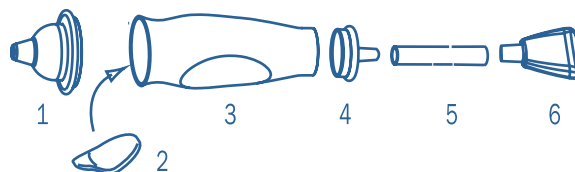

1. Nastavek za nos je nelomljiv, lahko se sterilizira in uporablja neomejeno dolgo. Ima zaobljeno obliko, ki se nežno prilega otrokovi nosnici in je ne poškoduje. Komplet vsebuje še 3 dodatne nastavke.
2. Med nastavek za nos in lovilec sluzi vstavimo kos vate, ki jo po uporabi enostavno zavržemo. Vata zadrži dojenčkovo sluz in prepreči, da bi prišli v stik z njo.
3. Nosni aspirator z lovilec sluzi je ergonomsko oblikovan in omogoča enostavno uporabo.
4. Cevni nastavek povezuje nosni aspirator s cevko.
5. Cevka je mehka in dolga 31 cm.
6. Ustnik enostavno vstavimo v usta in stisnemo z zobmi. Z vdihom sluz nežno posesamo v lovilec sluzi.

**Medicinski pripomoček**

**Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah**

PROIZVAJALEC: Lab. GILBERT, Herouville Saint Claire, Francija  
UVOZNIK: DR. GORKIČ d.o.o., Obrtniška 11, Logatec